



NEDERLANDS

platform24

HANDLEIDING – SMART CARE PLANS – EPISODISCH

CLINIC, SMART CARE PLANS MEDISCH HULPMIDDEL VERSIE 2

Handleiding versie 4.0
09-05-2025





UDI-DI: 7350127221035



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing: eIFU die bijgesloten is bij het product en die te vinden is op de webpagina van de fabrikant.



2025-04-01



Platform24 Healthcare AB

Söder Mälarstrand 57, SE-118 25 Stockholm



Deze handleiding is een vertaling uit de oorspronkelijke taal, het Engels (en).

Ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan met betrekking tot het medische hulpmiddel dienen gemeld te worden aan Platform24 en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Publicatie-ID Paligo

22421 (UUID-880dbf0f-849d-c846-4f71-a2cfe43084ef)

Interne publicatieversie Paligo

4.0

Inhoudsopgave

1. Inleiding	5
1.1. Over Smart Care Plans - Episodisch	5
1.2. Hardware- en softwarespecificaties	6
2. Contactgegevens	7
2.1. Fabrikant	7
2.2. Ondersteuning	7
2.2.1. Ondersteuning voor eindgebruikers	7
2.2.2. Ondersteuning door supergebruikers	7
2.3. Feedback en vragen over de handleiding	8
2.3.1. Een gedrukte versie van de gebruiksaanwijzing aanvragen	8
3. Definitie van symbolen en voorzorgsmaatregelen	9
3.1. Definitie van symbolen	9
3.2. Definitie van voorzorgsmaatregelen	9
4. Smart Care Plans - Beoogd gebruik	11
4.1. Naam product	11
4.2. Beoogd gebruik	11
4.3. Beoogd gebruikersprofiel	11
4.3.1. Doelgroep	11
4.3.2. Beoogde gebruikers	11
4.4. Beoogde operationele omgeving	12
4.5. Beoogde doelomstandigheden	12
4.6. Beoogde patiëntenpopulatie	12
4.7. Beoogde klinische voordelen	12
4.8. Prestatiekenmerken	13
4.9. Contra-indicaties	13
4.10. Resterende risico's	13
4.11. Voorzienbaar misbruik	14
5. Aan- en afmelden	15
5.1. Aanmelden bij Clinic	15
5.2. Afmelden bij Clinic	15
6. Het Zorgpaden overzicht	16
6.1. Patiëntenlijst	16
7. Patiënt inschrijven in een zorgpad	19
8. Patiëntprofiel	23
9. Gedetailleerd zorgpadenoverzicht	26
9.1. Algemene informatie	26
9.2. Over	27
9.3. Toegewezen zorgverleners	27
9.3.1. Toegewezen zorgverleners toevoegen	27
9.3.2. Toegewezen zorgverleners bewerken	28
9.4. Informatie-artikelen	28
9.5. Een zorgpad annuleren	29
9.6. Geplande stappen	30
9.7. Voltooide stappen	31
9.8. Weergeven als flowdiagram	31
10. Informatie over een zorgpad weergeven	33
10.1. Vragenlijsten weergeven	33
10.1.1. Status	33
10.1.2. Antwoorden op de vragenlijst	33
10.1.3. Grafieken	34
10.2. Afspraken en boekingen gekoppeld aan een zorgpad	35
10.3. Boekingtickets gekoppeld aan een zorgpad	36
10.4. Taken aangemaakt in een zorgpad	37

10.4.1. Inkomende taken	37
10.4.2. Taken door mij afgetekend	37
11. Termen en definities	39
12. Handleidingversies	40
13. Referenties	41

1. Inleiding

1.1. Over Smart Care Plans - Episodisch

Smart Care Plans - Episodisch is een product van Platform24 om zorgactiviteiten voor geplande episodische zorg te automatiseren en met elkaar te verbinden.

Met Smart Care Plans - Episodisch kun je gebeurtenissen en activiteiten combineren om klinische zorgpaden optimaal in te richten. Zorgactiviteiten, vaak stappen genoemd, kunnen op verschillende manieren worden samengevoegd om zorgprocessen te ondersteunen. Deze activiteiten kunnen ten opzichte van elkaar worden gepland en ook geactiveerd worden op basis van de uitkomsten van andere activiteiten.

Smart Care Plans - Episodisch is een variant van Smart Care Plans die wordt gebruikt voor episodische zorgstromen zoals bijvoorbeeld een operatieproces. Smart Care Plans is de overkoepelende naam van het product dat zorgplannen ondersteunt voor zowel episodische als monitorende zorgstromen. Deze handleiding beschrijft de episodische zorgstromen en in de rest van de handleiding wordt Smart Care Plans gebruikt om naar het product te verwijzen. Raadpleeg voor meer informatie over de monitorende zorgstromen de Smart Care Plans - Monitoring handleiding.

Op dit moment ondersteunen we de volgende zorgactiviteiten in een zorgpad, maar er zullen voortdurend nieuwe activiteiten worden toegevoegd:

- **Stap voor digitale afspraak**
- **Stap voor fysieke afspraak**
- **Stap voor boekingsticket:** activeert een boekingsticket dat de patiënt kan gebruiken om een afspraak in te plannen.
- **Stap voor vragenlijst:** activeert een vragenlijst die de patiënt kan beantwoorden.
- **Aanbevelingsstap:** activeert een vragenlijst die de patiënt kan beantwoorden en geeft de patiënt een aanbeveling op basis van de antwoorden.
- **Informatiestap:** toont informatie op een gespecificeerd moment die de patiënt kan lezen en bevestigen.
- **Takenstap:** maakt een taak aan in Clinic.
- **Toestemmingsstap:** activeert een toestemmingsstap waarin de patiënt toestemming kan geven op een of meerdere consents.
- **Stap voor e-mail/sms/pushmelding voor patiënt:** stuurt een e-mail, sms of pushmelding naar de patiënt.

Een zorgpad in Platform24 kan op twee verschillende manieren geactiveerd worden:

1. Een zorgverlener schrijft een patiënt handmatig in in een zorgpad in Clinic.
2. Een bepaalde gebeurtenis in een extern *EHR*-systeem (bijv. het boeken van een afspraak) zorgt ervoor dat een zorgpad wordt geactiveerd in Platform24 via een integratie.

**OPMERKING**

De handleiding is mogelijk niet altijd volledig up-to-date wat betreft alle elementen van de gebruikersomgeving (UI). Het is bijvoorbeeld mogelijk dat bijgewerkte kleinere UI-elementen, zoals namen van knoppen, velden enz., op zichzelf geen nieuwe versie van de handleiding opleveren. Alle UI-wijzigingen worden echter wel gecommuniceerd in de release notes op het moment van bijwerken. Alle waarschuwingen in de handleiding zijn altijd up-to-date en daarnaast zullen nieuwe waarschuwingen worden gecommuniceerd in de release notes.

1.2. Hardware- en softwarespecificaties

- | | |
|----------|---|
| Hardware | <ul style="list-style-type: none">• Computer met SITHS-kaartlezer (alleen vereist wanneer de zorgverlener zich authenticiseert met de SITHS-kaart) - alleen Zweden• Computer met Windows OS• 8 GB RAM• Bandbreedte > 600 kb/s per stream voor gesprekken• Camera (vereist voor videogesprekken)• Microfoon (vereist voor videogesprekken)• Luidsprekers of koptelefoon (vereist voor videogesprekken)• Schermresolutie 1366x768 of hoger• Muis met scrollwiel (vereist voor vaste computers) |
| Software | <ul style="list-style-type: none">• 2 nieuwste versies van Microsoft Edge (Chromium)• Laatste versie van Chrome |

2. Contactgegevens

2.1. Fabrikant

Adres	Platform24 Healthcare AB Söder Mälarstrand 57 SE-118 25 Stockholm
Website	https://platform24.com

2.2. Ondersteuning

2.2.1. Ondersteuning voor eindgebruikers

Platform24 biedt geen directe toegang tot ondersteuning voor eindgebruikers. Voor vragen zijn je lokale *supergebruikers* en trainers de eerste ondersteuningslijn.

Raadpleeg je interne routines en procedures voor informatie over de supergebruikers binnen je organisatie.

2.2.2. Ondersteuning door supergebruikers

Een *supergebruiker* is een eindgebruiker met meer kennis en verantwoordelijkheid over het platform op elke eenheid.

De supergebruiker fungeert als eerstelijns ondersteuning voor de eindgebruikers van het hulpmiddel en is degene die zich wendt tot Platform24 voor verdere ondersteuning, indien nodig.

Raadpleeg je interne routines en procedures voor informatie over de supergebruikers binnen je organisatie.

Dringende gevallen

Voor dringende gevallen dienen supergebruikers het onderstaande telefoonnummer van Platform24 support te bellen.

Telefoon: +46 (0) 10-140 23 21

Niet-dringende gevallen

Voor alle niet-dringende gevallen dienen supergebruikers een e-mail te sturen naar onderstaand support e-mailadres.

E-mail: <support@platform24.com>

Voor vragen over aanvullende services of modules die je organisatie mogelijk wil kopen of activeren, dienen supergebruikers contact op te nemen met hun *Customer Success Manager*, (CSM) op Platform24.

2.3. Feedback en vragen over de handleiding

Stuur voor feedback en vragen over de handleiding een e-mail naar het onderstaande support e-mailadres.

E-mail: <support@platform24.com>

2.3.1. Een gedrukte versie van de gebruiksaanwijzing aanvragen

De gebruiksaanwijzing (IFU) is opgenomen in de handleiding voor elk product en is in digitaal formaat beschikbaar in de gebruikersomgeving.

Als je een papieren versie van de handleiding nodig hebt, kunt je contact opnemen met Platform24 via:

E-mail: <support@platform24.com>

Een papieren versie zal uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van een verzoek van de gebruiker worden geleverd, of op het moment van levering van het hulpmiddel indien daarom is verzocht bij de bestelling.

3. Definitie van symbolen en voorzorgsmaatregelen

3.1. Definitie van symbolen



CE-markering



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor belangrijke informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen.



Productiedatum



Fabrikant



Medisch hulpmiddel



Uniek apparaatnummer

3.2. Definitie van voorzorgsmaatregelen

In deze paragraaf worden de verschillende soorten voorzorgsmaatregelen beschreven die in de handleidingen worden gebruikt.



WAARSCHUWING

Een waarschuwing geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.



LET OP

'Let op' geeft een gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.



BELANGRIJK

Een belangrijke voorzorgsmaatregel geeft informatie aan die belangrijk is voor de gebruiker om op te merken.

**OPMERKING**

Een opmerking geeft informatie aan die de gebruiker moet opmerken.

**TIP**

Een tip geeft aanbevelingen voor de gebruiker.

4. Smart Care Plans - Beoogd gebruik

4.1. Naam product

Slimme zorgplannen

4.2. Beoogd gebruik

Smart Care Plans is software die wordt gebruikt in een poliklinische omgeving waar medische parameters asynchroon worden gerapporteerd door patiënten via externe diensten, gekoppelde apparatuur of handmatige invoer. Smart Care Plans is bedoeld om ontvangen medische parameters of resultaten van medische vragenlijsten te bewaken, deze te vergelijken met acceptatiegrenzen en het klinisch beheer te informeren door middel van de volgende functionaliteiten:

1. Waarschuwingen aan de behandelend zorgverlener met verschillende prioriteitsniveaus.
2. Presentatie van geconfigureerde berichten, aanwijzingen en verzoeken tot actie aan de patiënt.
3. Weergave van waarden of trends in waarden in relatie tot acceptatiegrenzen in de tijd, gebruikmakend van visualisaties en schriftelijke berichten.

Smart Care Plans is geschikt voor elke klinische aandoening die baat heeft bij geplande acties gebaseerd op het verzamelen van relevante medische parameters. De configureerbaarheid maakt het aanpasbaar aan een breed scala van klinische aandoeningen.

4.3. Beoogd gebruikersprofiel

4.3.1. Doelgroep

Zorginstellingen

4.3.2. Beoogde gebruikers

- Zorgpersoneel
- Patiënten
- Ontwikkelaars van medische inhoud

Zorgpersoneel

Zorgplannen maken en aanpassen en handelen naar aanleiding van getriggerde acties.

Details

<u>Type gebruiker</u>	Professioneel
<u>Leeftijd</u>	>20 jaar oud
<u>Instructiesniveau</u>	• Bevoegde zorgverlener, bijv. arts, verpleegkundige, psycholoog • Niveau C1-C2 in de taal die wordt ondersteund door het product voor de relevante markt. • Handleiding
<u>Interface</u>	Clinic (web)

Patiënten

Patiënten voeren gegevens in en handelen naar aanleiding van getriggerde acties.

Details

<u>Type gebruiker</u>	Iemand zonder voorafgaande kennis
<u>Leeftijd</u>	• Systeem default: 0-120 jaar • Het systeem stelt patiënten in staat om voor zichzelf zorg te zoeken vanaf de leeftijd waarop ze zich digitaal kunnen identificeren. De precieze leeftijd wordt echter bepaald door de zorginstelling. • Met het systeem kunnen gebruikers ook zorg zoeken voor hun kind tot de leeftijd van 18 jaar.
<u>Instructiesniveau</u>	• Niveau B1-B2 in de taal die wordt ondersteund door het product voor de relevante markt.
<u>Interface</u>	Patiënt (app/web)

Ontwikkelaars van medische inhoud

Maak sjablonen voor zorgplannen.

Details

<u>Type gebruiker</u>	Professioneel
<u>Leeftijd</u>	>20 jaar oud
<u>Instructiesniveau</u>	• Opleiding en training gevolgd • Niveau C1-C2 in de taal die wordt ondersteund door het product voor de relevante markt. • Handleiding
<u>Interface</u>	Manage (web)

4.4. Beoogde operationele omgeving

Smart Care Plans is bedoeld voor gebruik door zorginstellingen en gezondheidszorgsystemen in landen waar de bevolking toegang heeft tot het internet via smartphones of computers.

4.5. Beoogde doelomstandigheden

Smart Care Plans is bedoeld om gebruikt te worden voor bekende en voorspelbare gezondheidsaandoeningen, onderzoeken of zorgepisodes waarbij een slim digitaal zorgplan haalbaar is en voordeel oplevert voor de patiënt zonder dat er continue gezondheidsgegevensstromen nodig zijn.

4.6. Beoogde patiëntenpopulatie

Smart Care Plans wordt gebruikt door de patiënten, zoals bepaald door hun zorgverleners, om accurate medische informatie te verstrekken voor klinisch management. De doelgroep omvat patiënten die behoefte hebben aan een slim digitaal zorgplan om bijvoorbeeld hun chronische ziekte te monitoren of een electieve zorgepisode af te handelen.

4.7. Beoogde klinische voordelen

Het klinische voordeel van Smart Care Plans ligt in effectiever patiëntbeheer. Dit wordt gedaan door het verhogen van de relevantie van de informatie die aan zorgverleners wordt gepresenteerd door gebruik te maken van op regels gebaseerde acties, waardoor zorgverleners zich meer kunnen richten op patiënten die hun aandacht nodig hebben en mogelijk ook meer patiënten kunnen behandelen, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Door de op regels gebaseerde acties zijn beslissingen en/of acties op de gerapporteerde medische parameters ook vrijwel onmiddellijk, wat betekent dat patiënten sneller een beoordeling van hun gezondheidsparameters krijgen.

Andere indirecte klinische voordelen zijn dat patiënten accurate en tijdige feedback krijgen over hun gerapporteerde gezondheidsparameters, doordat zorgverleners regelgebaseerde communica-

tie met de patiënt kunnen automatiseren en dit op een gebruiksvriendelijke manier kunnen presenteren. Een ander voordeel ligt in de mogelijkheid van Smart Care Plans om zich aan te passen aan de huidige gezondheid van de patiënt, wat zowel de relevantie en veiligheid voor de individuele patiënt als de relevantie voor zorgverleners verhoogt.

Het product Smart Care Plans heeft de volgende claims:

- Het gebruik van slimme gebeurtenissen verhoogt de relevantie van de informatie die wordt gepresenteerd aan de zorgverleners
- Door het gebruik van slimme gebeurtenissen kunnen zorgverleners meer patiënten behandelen
- Smart Care Plans maakt relevante en geïndividualiseerde zorgplannen mogelijk
- Het gebruik van Smart Care Plans brengt geen verhoogd risico met zich mee in vergelijking met standaard patiëntenmonitoring op afstand

4.8. Prestatiekenmerken

Door geïndividualiseerde drempelwaardes en acties voor medische parameters toe te staan, minimaliseert Smart Care Plans onnodige taken door ervoor te zorgen dat zorgverleners alleen klinisch relevante informatie ontvangen, waardoor de efficiëntie van patiëntbeheer wordt verbeterd.

4.9. Contra-indicaties

Bepaalde patiënten mogen het product niet gebruiken:

1. Patiënten met levensbedreigende symptomen die onmiddellijke medische aandacht vereisen, d.w.z. waarvan wordt verwacht dat ze binnen 24 uur acuut in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. Wanneer deze symptomen worden ontdekt tijdens het gebruik van Smart Care Plans, moet het gebruik van het apparaat worden gestopt.
2. Patiënten die niet goed geïnformeerd zijn over hun gezondheidstoestand, inclusief maar niet beperkt tot het herkennen van tekenen van verslechtering van hun gezondheidstoestand en weten wanneer, waar en hoe ze spoedeisende hulp moeten zoeken als dat nodig is.
3. Patiënten met ernstige cognitieve problemen (inclusief maar niet beperkt tot dementie of ernstige verstandelijke beperking).
4. Patiënten voor wie de toegang tot de vereiste medische gegevens voor het gebruik van een slim digitaal zorgplan beperkt is.
5. Smart Care Plans is niet bedoeld om informatie te verschaffen die wordt gebruikt om beslissingen te nemen met diagnose of therapeutische doeleinden wanneer dergelijke beslissingen een invloed hebben die de dood, onomkeerbare verslechtering van de gezondheidstoestand van een persoon, ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een persoon of een chirurgische ingreep kan veroorzaken.

4.10. Resterende risico's

Ondanks de implementatie van risicobeheersingsmaatregelen blijven er bepaalde resterende risico's bestaan die niet volledig kunnen worden geëlimineerd:

- Door onjuiste of misleidende informatie kunnen verkeerde beslissingen over de behandeling worden genomen.
- Vertraagde of afwezige behandeling kan het gevolg zijn van afhankelijkheid van connectiviteit en beschikbaarheid van de software.
- Onnauwkeurige gebruikersinvoer kan leiden tot onjuiste of misleidende output die op zijn beurt weer gevolgen kan hebben voor de prestaties en het klinisch voordeel.
- Softwarefouten kunnen onverwacht gedrag veroorzaken dat de prestaties en het klinische voordeel kan beïnvloeden.

- Ook al is er de nodige zorg besteed aan het valideren van alle zorgplantemplates, toch kan de configuratie van zorgplantemplates resulteren in ongeschikte zorgplannen op basis van de capaciteiten en conditie van de patiënt.
- Gebruikersfouten, waaronder een verkeerde interpretatie van de interface, kunnen het juiste gebruik beïnvloeden en het klinische voordeel beïnvloeden.

Gebruikers dienen de instructies zorgvuldig op te volgen en klinisch inzicht toe te passen bij het interpreteren van de resultaten.

4.11. Voorzienbaar misbruik

Bepaalde gedragingen zijn technisch mogelijk door het product, maar vallen buiten het beoogde gebruik:

1. Smart Care Plans is niet bedoeld om beslissingen over ernstig zieke patiënten te automatiseren.
2. Smart Care Plans is niet bedoeld voor bewaking van patiënten in een intramurale setting.
3. Smart Care Plans is niet bedoeld om een proces te vervangen dat bedoeld is om het risico op zelfmoord of zelfbeschadiging bij een patiënt te verminderen. Het is echter wel de bedoeling dat het product het werk verbetert om het risico op zelfmoord of zelfbeschadiging bij een patiënt te verminderen.
4. Smart Care Plans is niet bedoeld voor continue synchrone bewaking.
5. Smart Care Plans is niet bedoeld voor het zelfstandig bepalen van het management van de patiënt in een afgesloten lussysteem, zonder tussenkomst van een zorgverlener.
6. Smart Care Plans mag niet worden geïnitieerd via een integratie vanuit een extern systeem als het zorgplan schade kan veroorzaken als het wordt toegepast op de verkeerde patiënt.

5. Aan- en afmelden

5.1. Aanmelden bij Clinic

1. Open de browser en voer de URL <https://clinic.platform24.se> in.
De aanbevolen webbrowsers zijn **Google Chrome** of **Microsoft Edge**.



OPMERKING

Sommige klanten kunnen een unieke omgevingslink hebben. Neem contact op met je supergebruiker als de link niet werkt.

2. Meld je aan met de geselecteerde verificatiemethode.



OPMERKING

De geselecteerde verificatiemethode is klantspecifiek. Neem contact op met je supergebruiker als je niet zeker bent over het aanmeldproces in jouw kliniek.

5.2. Afmelden bij Clinic

1. Klik op **Afmelden** in de linkerbenedenhoek.

6. Het Zorgpaden overzicht

Om naar het **Zorgpaden** overzicht te gaan, klik je op **Zorgpaden** in het hoofdmenu.

Zorgpaden

Totaal aantal patiënten: 9 Toegewezen aan jou: 0

Patiënt inschrijven

Zorgpaden BSN Toegewezen zorgverlener

Selecteer een zorgpad Zoek Selecteer een zorgverlener Toon inactieve zorgpaden

Patiënt	Zorgpad	Inschrijvingsdatum	Huidige fase	Volgende afspraak	Datum	Toegewezen zorgverleners
Nicolas Surname 19 XXXXXX-XXXX	Pathway with everything	6 september 2024 om 15:52				
Mateusz Surname 19 XXXXXX-XXXX	EVLt-treatment	9 juli 2024 om 07:42		EVLt treatment	7 juli 2025 om 09:00	JD
Nicolas Surname 19 XXXXXX-XXXX	Pathway with everything	7 mei 2024 om 08:46				
Matteus Surname 19 XXXXXX-XXXX	EVLt-treatment	15 april 2024 om 15:17		EVLt treatment	18 december 2024 om 08:00	JD
Filip Surname 19 XXXXXX-XXXX	EVLt-treatment	15 april 2024 om 15:11		EVLt treatment	18 december 2024 om 08:00	AS JD

Het **Zorgpaden** overzicht bestaat uit de volgende onderdelen:

Dashboard

Het dashboard geeft informatie over hoeveel patiënten zijn ingeschreven in een zorgpad binnen je huidige zorgseenheid (**Totaal aantal patiënten**) en hoeveel patiënten in actieve zorgpaden **aan jou zijn toegewezen**.

Patiënt inschrijven

Met de knop **Patiënt inschrijven** kun je handmatig een patiënt inschrijven voor een zorgpad. Zie [Patiënt inschrijven in een zorgpad \[19\]](#) voor meer informatie.

Om een patiënt voor een zorgpad in te schrijven, moet de patiënt eerst geregistreerd zijn in de Clinic-applicatie. Raadpleeg de *Clinic-handleiding* voor informatie over het toevoegen van een nieuwe patiënt in Clinic.



OPMERKING

Als je een boekingsintegratie hebt waarbij zorgpaden automatisch worden aangemaakt in Platform24 via de integratie, dan maak je geen gebruik van deze functionaliteit.

Patiëntenlijst

De patiëntenlijst laat patiënten zien die staan ingeschreven in een zorgpad in je specifieke zorgseenheid. Zie [Patiëntenlijst \[16\]](#) voor meer informatie over de patiëntenlijst.

6.1. Patiëntenlijst

De patiëntenlijst in het zorgpadenoverzicht bevat alle patiënten die zijn ingeschreven in een zorgpad bij een specifieke zorgseenheid.

Zorgpaden		BSN	Toegewezen zorgverlener		Toon inactieve zorgpaden	
Selecteer een zorgpad		Zoek	Selecteer een zorgverlener		☐	
Patiënt	Zorgpad	Inschrijvingsdatum	Huidige fase	Volgende afspraak	Datum	Toegewezen zorgverleners
Nicolas 19 91	Pathway with everything	6 september 2024 om 15:52				
Eugeny 19 90	EVLt-treatment	9 juli 2024 om 07:42		EVLt treatment	7 juli 2025 om 09:00	JD
Nicolas 19 91	Pathway with everything	7 mei 2024 om 08:46				

De patiëntenlijst bevat de volgende informatie/kolommen:

Patiënt

Naam en *unieke persoonlijke identificatie*.

Status

Status van het zorgpad. Kan "Actief", "Voltooid" of "Geannuleerd" zijn.



OPMERKING

Deze kolom wordt alleen getoond als de schuifknop **Toon inactieve zorgpaden** is ingeschakeld.

Zorgpad

De naam van het zorgpad waarin de patiënt is ingeschreven.

Datum inschrijving

De datum waarop de patiënt werd ingeschreven in het zorgpad.

Huidige fase

De fase in het zorgpad waarin de patiënt zich momenteel bevindt.



OPMERKING

Sommige zorgpaden kennen het concept "fasen" niet. In dat geval is deze kolom leeg.

Volgende afspraak

De eerstvolgende afspraak in het zorgpad.

Datum

De datum van de eerstvolgende afspraak in het zorgpad.

Toegewezen zorgverleners

De verantwoordelijke zorgverlener(s) voor het zorgpad van de patiënt. Hoofdzakelijk gebruikt om te filteren op de zorgpaden waarvoor een specifieke zorgverlener verantwoordelijk is en om taken binnen het zorgpad te sturen naar de toegewezen zorgverlener.

De patiëntenlijst is standaard gesorteerd op **Datum inschrijving** (wanneer de patiënt is ingeschreven in een zorgpad).

Klik op een patiëntnaam om het patiëntprofiel weer te geven waar je gedetailleerde patiëntgegevens kunt zien. Zie [Patiëntprofiel \[23\]](#) voor meer informatie over het patiëntprofiel. Als je naar [Gedetailleerd zorgpadenoverzicht \[26\]](#) wilt gaan, klik dan op een zorgpad.

Als je alleen de patiënten wilt zien die ingeschreven staan in een specifiek zorgpad, kun je dit doen door een zorgpad te selecteren in de keuzelijst.

Het is ook mogelijk om naar een patiënt in de lijst te zoeken aan de hand van de unieke persoonlijke identificatie. Daarnaast is het mogelijk om alle patiënten te zien waar een specifieke zorgverlener verantwoordelijk voor is door de zorgverlener te selecteren in de keuzelijst.

Het overzicht **Zorgpaden** toont standaard alleen actieve zorgpaden, maar als je ook de inactieve zorgpaden wilt zien (d.w.z. de voltooide of geannuleerde zorgpaden), klik dan op de schuifknop **Toon inactieve zorgpaden**.

Zorgpaden		BSN	Toegewezen zorgverlener				
Selecteer een zorgpad		Zoek	Selecteer een zorgverlener		Toon inactieve zorgpaden ☒		
Patiënt	Status	Zorgpad	Inschrijvingsdatum	Huidige fase	Volgende afspraak	Datum	Toegewezen zorgverleners
Viktor 19 91	Geannuleerd	EVLT-treatment	17 september 2024 om 11:24				PD
Firstname Surname 19 93	Voltooid	EVLT-treatment	10 september 2024 om 09:16				PD
Firstname Surname 19 90	Geannuleerd	EVLT-treatment	10 september 2024 om 07:41				

7. Patiënt inschrijven in een zorgpad



OPMERKING

Deze specifieke functionaliteit wordt niet gebruikt als de klant een integratie heeft waarbij zorgpaden automatisch worden geactiveerd.

1. Ga naar het overzicht **Zorgpaden** (of het **gedetailleerde zorgpadenoverzicht** in een patiëntprofiel).
2. Klik op de knop **Patiënt inschrijven**.
3. Voer de unieke persoonlijke identificatie in van de patiënt die je wilt toevoegen en druk op Enter op het toetsenbord of klik op het zoeksymbool naast het invoerveld. De gegevens van de geselecteerde patiënt worden dan weergegeven.

* Patiënt

Florin Surname (19 XXXXXX-XXXX) ▼

Selecteer patiënt:



Florin Surname
19XXXXXX-XXXX



OPMERKING

Als de patiënt nog niet geregistreerd is in Clinic, moet je de patiënt registreren in Clinic voordat je hem/haar kunt toevoegen aan het zorgpad. Raadpleeg de *Clinic-handleiding* voor informatie over het toevoegen van een nieuwe patiënt in Clinic. Zodra de patiënt is geregistreerd, herhaal je de eerste stappen in deze instructie.

4. Selecteer de verantwoordelijke zorgverleners in de keuzelijst (je kunt meerdere opties selecteren) en klik op **Volgende**.

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor welk zorgpad je de patiënt wilt inschrijven. Je kunt kiezen uit de zorgpaden die zijn geconfigureerd.

Zorgpad

* Zorgpad

Selecteer een zorgpad

- vrouw novasure poli
- vrouw onderzoek cystoscopie
- vrouw perineoplastiek
- vrouw ptns behandeling

6. Nadat je een zorgpad hebt geselecteerd, zie je een vereenvoudigd overzicht van de verschillende stappen in dat specifieke zorgpad. Klik op **Volgende** om verder te gaan.

* Zorgpad

EVLt-behandeling

Voorbeeld van het zorgpad "EVLt-behandeling"

Fase	Volgorde	Zorgpad stap
	1	Informatie: Leefregels dag van de behandeling
	2	Afspraak: EVLT-behandeling
	3	Vragenlijst: Toestemming operatie/behandeling



OPMERKING

Als de patiënt al is ingeschreven voor dat zorgpad, ontvang je een waarschuwing.



De patiënt is al ingeschreven in een soortgelijk zorgpad:

Test information step overflow

Ingeschreven sinds 20 september 2024 om 10:46

7. Als het zorgpad een boekingsstap (externe afspraak) of een afspraakstap (afspraak in Clinic) bevat, wordt je gevraagd een keuze te maken uit de komende afspraken van de patiënt en de juiste afspraak te koppelen aan de juiste stap in het zorgpad.

*** Afspraak: EVLT-behandeling**

The screenshot shows a user interface for selecting an appointment. At the top, there is a button labeled 'Kies afspraak' with a calendar icon. Below this, a card displays the appointment details: 'EVLT-behandeling' followed by '26 september 2024 om 15:25'. Underneath, it says 'Digitale afspraak' with a document icon, and 'Malin' followed by a blurred patient name.



OPMERKING

Als de patiënt geen komende afspraken of boekingen heeft, wordt de zorgverlener hierover geïnformeerd.

*** Afspraak: Herhaalconsult acne**

The screenshot shows a user interface where no appointments are available for selection. It features a button labeled 'Kies afspraak' with a calendar icon. Below the button, the text reads 'Geen afspraken om uit te kiezen.' followed by a link 'Maak een afspraak in Clinic'.

8. Na het koppelen van de afspraken zie je opnieuw het vereenvoudigde voorbeeld van het zorgpad, nu met de begindata voor elke stap in het zorgpad. Klik op **Volgende** om verder te gaan.

Care pathway

Fase	Volgorde	Zorgpad stap	Start datum
	1	Informatie: Leefregels dag van de behandeling	26 september 2024 om 15:04
	2	Afspraak: EVLT-behandeling	26 september 2024 om 15:25
	3	Vragenlijst: Toestemming operatie/behandeling	26 september 2024 om 15:04

9. In de overzichtswaargave zie je een samenvatting van de patiëntgegevens, de toegewezen zorgverleners en het geselecteerde zorgpad.

10. Bekijk de samenvatting en klik op **Patiënt inschrijven** om de patiënt in te schrijven voor dit zorgpad.

8. Patiëntprofiel

Om een patiëntprofiel te openen vanuit het overzicht, klik je op de naam van een patiënt. Je kunt ook naar de patiënt zoeken in het hoofdmenu aan de linkerkant (**Patiënt zoeken**).

AL

Anna

32 jaar, 1991

Geslacht

Lengte

Gewicht

BMI

Vrouw

Patiëntgegevens

Tickets

Alle afspraken

Zorgpaden

Nieuwe afspraak

Patiëntgegevens

Gezondheidsprofiel

Waarschuwingen

Interne notities

Relaties

Anna

(1991)

Voornaam

Anna

Achternaam

Telefoon

+46

E-Mail

Beschermde Identiteit

Nee

Bewerken

De tabbladen bovenaan in het patiëntprofiel zijn:

1. Patiëntgegevens

Bevat de gegevens van de patiënt, zoals patiëntinformatie (inclusief e-mail, telefoonnummer, enz.), gezondheidsprofiel, waarschuwingen, interne notities en relaties (kinderen verbonden aan deze patiënt, dit kan ook uitgezet worden).

2. Tickets

Bevat boekingstickets en losse vragenlijsten (vragenlijsttickets) die naar patiënten zijn gestuurd. Je kunt de status van elk ticket bekijken. Als een patiënt het ticket heeft gebruikt en een afspraak heeft gemaakt, wordt de status van die afspraak ook weergegeven.



OPMERKING

Hier zijn ook tickets en vragenlijsten te vinden die naar de patiënt zijn verstuurd vanuit een zorgpad.

3. Gezondheidsgegevens

Visualiseert specifieke gezondheidsgegevens die zijn verzameld in vragenlijsten in de vorm van grafieken. Zie [Grafieken \[34\]](#) voor meer informatie.



OPMERKING

Als er gezondheidsgegevens uit vragenlijsten gewenst zijn in een grafiek, moet dit worden geconfigureerd in de vragenlijsten.

4. Patiëntactiviteit

Toont geplande en recente activiteiten met betrekking tot de patiënt, afspraken, taken en overleggen van zorgeenheden binnen dezelfde zorgverlener. Activiteiten van andere zorgverleners binnen dezelfde partner zijn alleen zichtbaar als de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

 Peter Surname 34 jaar, 199008NN-NNNN		Geslacht Man	Lengte	Gewicht	BMI
Patiëntgegevens	Tickets	Meetwaarden	Patiënt activiteit		Zorgpaden
Afspraken		Taken	Overleggen	Interviews	
Datum	Type	Titel	Status	Zorgpersoneel	
16 dec 2024	Online afspraak	Acne	Beindigd	Name Surname Care unit	
1 okt 2024	Online afspraak	Acne	Beindigd	Name Surname Care unit	
2 jul 2024	Online afspraak	Allergie	Geannuleerd	Name Surname Care unit	

5. Zorgpaden

Toont alle zorgpaden waarvoor de patiënt momenteel is ingeschreven (actieve zorgpaden) of die al verlopen zijn (inactieve zorgpaden) binnen de huidige zorgverlener. Als de patiënt toestemming heeft gegeven, worden ook zorgpaden van andere zorgverleners binnen dezelfde partner getoond. Op elke zorgpadkaart staat informatie over het zorgpad: naam, beschrijving, status, geschatte voortgang, inschrijfdatum en verantwoordelijke zorgeenheid.

Om meer informatie over een specifiek zorgpad te bekijken, klik je op **Zie details** in de zorgpadkaart. Zie [Gedetailleerd zorgpadenoverzicht \[26\]](#) voor meer informatie.

AL

Anna

32 jaar, 1991

Geslacht

Vrouw

Lengte

Gewicht

BMI

Patiëntgegevens

Tickets

Alle afspraken

Zorgpaden



Nieuwe afspraak

Zorgpaden

+ Patiënt inschrijven in een zorgpad

+ Patiënt inschrijven in een zorgpad (BETA)

Actieve zorgpaden

Pathway with everything

Actief

Geschatte voortgang: 90%

Ingeschreven sinds: 6 september 2024 om 16:04

Zorgenheid: CU 1

[Zie details](#)

Pathway with everything

Actief

Geschatte voortgang: 90%

Ingeschreven sinds: 27 mei 2024 om 10:14

Zorgenheid: CU 1

[Zie details](#)

9. Gedetailleerd zorgpadenoverzicht

In het gedetailleerde zorgpadenoverzicht kun je meer informatie over het zorgpad bekijken. Hier kun je zien waar de patiënt zich in het zorgpad bevindt en welke stappen voor de patiënt nog gepland en al voltooid zijn.

Zorgpaden / EVLT-treatment Open troubleshooting details

15%

EVLT-treatment Actief

Geschatte voortgang

Over

Ingeschreven sinds: 26 september 2024 om 08:31
Zorgzaamheid:

Toegewezen zorgverleners

Dit zorgpad heeft geen toegewezen zorgverlener
+ Toegewezen zorgverleners

Informatie artikelen

[Information about varicose veins](#)
[Information EVLT-treatment](#)
[Guidelines varicoseveins surgery](#)

Geplande stappen

Toon mogelijke taken ☐

Toon notificaties ☐

Toon als tabellen

Toon in een diagram (BETA)

Activeringsdatum	Status	Type	Titel	Einddatum
26 september 2024 om 08:31	Actief	Vragenlijst	Questionnaire BRMO/MRSA	26 september 2024 om 11:30
26 september 2024 om 08:31	Actief	Vragenlijst	Agreement surgery/treatment	26 september 2024 om 11:30
26 september 2024 om 08:31	Actief	Informatie	Leefregels 1 dag voor de behandeling	26 september 2024 om 12:30
26 september 2024 om 08:31	Actief	Informatie	Leefregels dag van de behandeling	27 september 2024 om 23:59

9.1. Algemene informatie

Bovenaan het gedetailleerde zorgpadenoverzicht zie je:

- Naam van het pad
- Status (Actief, Geannuleerd, Voltooid)
- Beschrijving van het pad (mits gedefinieerd)
- Geschatte voortgang



OPMERKING

Dit is een schatting op basis van de stappen die nog gepland staan.

Zorgpaden / EVLT-treatment

15%

EVLT-treatment Actief

Geschatte voortgang

9.2. Over

In het gedeelte **Over** is algemene informatie over het pad te vinden:

- Inschrijfdatum
- Zorgeenheid
- Aantal fasen (indien van toepassing)
- Huidige fase (indien van toepassing)

Over

Ingeschreven sinds: 26 september 2024 om 08:31

Zorgeenheid: 

9.3. Toegewezen zorgverleners

In het gedeelte **Toegewezen zorgverleners** kun je zien welke zorgverleners aan het pad zijn toegewezen.

Toegewezen zorgverleners [Bewerken](#)

Toegewezen arts: Jaanika Doctor


9.3.1. Toegewezen zorgverleners toevoegen

1. Klik op de knop **Zorgverlener toewijzen** in het gedeelte **Toegewezen zorgverleners**.

* **Afspraak:** EVLT-behandeling


 **Kies afspraak**

2. In het dialoogvenster dat opent, kun je zoeken naar zorgverleners om toe te voegen aan het pad.

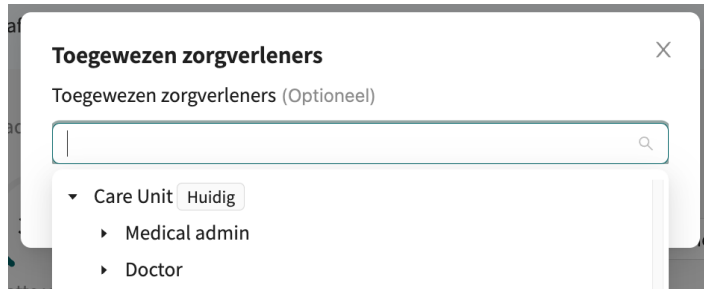

9.3.2. Toegewezen zorgverleners bewerken

1. Klik op de knop **Bewerken** in het gedeelte **Toegewezen zorgverleners**.

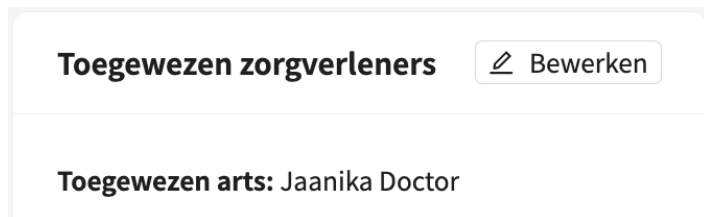


2. In het dialoogvenster dat geopend wordt, kun je zoeken naar extra zorgverleners om toe te voegen aan het pad, of huidige toegewezen zorgverleners verwijderen.



9.4. Informatie-artikelen

In het gedeelte **Informatie-artikelen** kun je alle informatie-artikelen zien die bij het zorgpad horen.

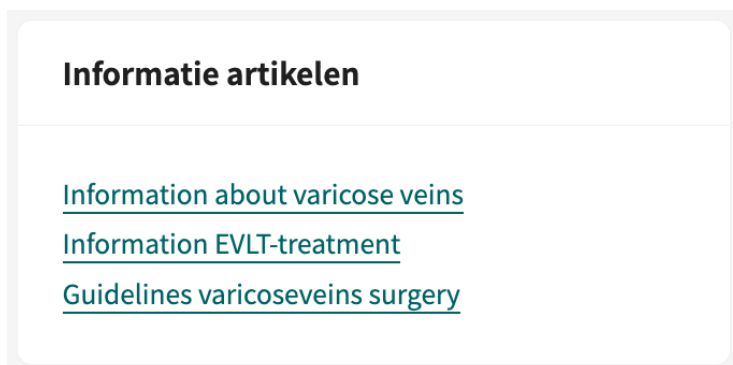

Als je op een link klikt, kun je het artikel openen en lezen.

Artikel: "Information about varicose veins" ✕

Wat zijn spataderen?

Spataderen zijn verwijde aderen die vooral in de benen voorkomen en veroorzaakt worden door lekkende kleppen in de aderen. De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van klachten, zoals pijnlijke of vermoeide benen, het voorkomen van complicaties en cosmetische wensen.

Verschillende typen spataderen +

Hoe krijgt u spataderen? +

Welke klachten geven spataderen? +

Hoe ontstaan spataderen? +

Welke behandelingen van spataderen zijn er? +

Sluiten



OPMERKING

Als je een informatie-artikel wilt bewerken, doe je dit in de applicatie Manage. Zie voor instructies de *Smart Care Plans Studio-handleiding*.

9.5. Een zorgpad annuleren

Om een zorgpad te annuleren, klik je op de knop **Annuleer zorgpad** in de rechterbovenhoek van het gedetailleerde zorgpadenoverzicht.

 Annuleer zorgpad

Als een zorgpad voor een patiënt is geannuleerd, kan de patiënt het zorgpad nog steeds zien in de Patiënt-app, maar wordt het gemarkeerd als geannuleerd.



Annuleer zorgpad

Als je een zorgpad annuleert, worden alle openstaande stappen (afspraken, boekingsstickets, vragenlijsten etc.) ook geannuleerd.

Houd er rekening mee dat **afspraken gemaakt in externe systemen** niet automatisch worden geannuleerd.

Sluiten
Annuleer zorgpad



OPMERKING

Als een zorgpad wordt geannuleerd, worden ook de resterende stappen geannuleerd. Afspraken die in externe systemen zijn geboekt, worden echter *niet* automatisch geannuleerd. Deze afspraken moeten geannuleerd worden in het externe systeem zelf.

9.6. Geplande stappen

In de lijst **Geplande stappen** kun je alle komende en actieve stappen in het pad zien.

Geplande stappen				
Toon mogelijke taken ? ☐		Toon notificaties ? ☒		Toon als tabellen Toon in een diagram (BETA)
Activeringsdatum	Status	Type	Titel	Einddatum
18 december 2024 om 08:00	Gepland	Afspraak	<u>EVLt treatment</u>	18 december 2024 om 08:05
	Potentieel	Informatie	Leefregels 2 dagen na de behandeling	22 december 2024 om 23:59

De lijst met geplande stappen bevat de volgende informatie:

Activeringsdatum	De datum waarop de stap actief wordt. Als de activeringsdatum nog niet kan worden berekend, zal deze kolom leeg zijn.
Status	Een geplande stap kan de volgende statussen hebben: Potentieel: de stap zou kunnen gebeuren. Gepland: de stap is gepland en wordt actief op de activeringsdatum. Actief: de stap is actief. In afwachting van boeking: de stap is geblokkeerd omdat deze afhankelijk is van een boekings-/afspraakstap waarbij een datum ontbreekt.
Type	Type stap, bijvoorbeeld vragenlijst, online afspraak of taak.
Titel	Naam van de stap (zoals gespecificeerd in het zorgpad). Voor stappen die in Clinic in een andere weergave kunnen worden geopend, kun je op de titel klikken. Als je bijvoorbeeld op een komende digitale afspraak klikt, word je doorgestuurd naar de afspraakweergave en bij een actieve taak word je doorgestuurd naar de takenweergave.

Vervaldatum De datum waarop de stap vervalt.

De lijst met geplande stappen is gesorteerd in chronologische volgorde op de activeringsdatum en standaard worden mogelijke taken en patiëntmeldingen (sms, e-mails) *niet* weergegeven. Als je deze wel wilt zien, schakel dan de schuifknop **Toon mogelijke taken** of **Toon meldingen** in waarna ze in de lijst zullen verschijnen.

9.7. Voltooide stappen

In de lijst **Voltooide stappen** kun je alle voltooide stappen in het pad zien.

Voltooide stappen			
Datum	Status	Type	Titel
22 april 2024 om 15:17	 Geannuleerd	SMS de patiënt	Reminder questionnaires
22 april 2024 om 15:17	 Geannuleerd	Email de patiënt	Reminder questionnaires
22 april 2024 om 15:17	 Geannuleerd	Email de patiënt	Reminder questionnaires


De lijst met voltooide stappen bevat de volgende informatie:

- Datum** De datum waarop de stap overging naar zijn eindstatus, d.w.z. indien voltooid wordt de datum waarop de stap werd voltooid weergegeven en indien verlopen wordt de datum waarop de stap verliep weergegeven.
- Status** Een voltooide stap kan de volgende statussen hebben:
Voltooid: de stap is voltooid.
Geannuleerd: de stap is geannuleerd.
Verlopen: de stap werd niet voltooid voor de vervaldatum.
- Type** Hetzelfde als voor geplande stappen.
- Titel** Hetzelfde als bij geplande stappen. Merk op dat je in voltooide stappen ook op de titel kunt klikken om naar de voltooide vragenlijsten te gaan.

De lijst met voltooide stappen is gesorteerd in chronologische volgorde op de datum waarop deze is bijgewerkt en standaard worden patiëntmeldingen (sms, e-mails) *niet* weergegeven. Als je deze wel wilt zien, klik dan op **Toon notificaties** waarna ze in de lijst zullen verschijnen.

9.8. Weergeven als flowdiagram

Het is mogelijk om de stappen (zowel geplande als voltooide) te bekijken als een diagram in plaats van een lijstweergave door te klikken op de knop **Toon in een diagram**.

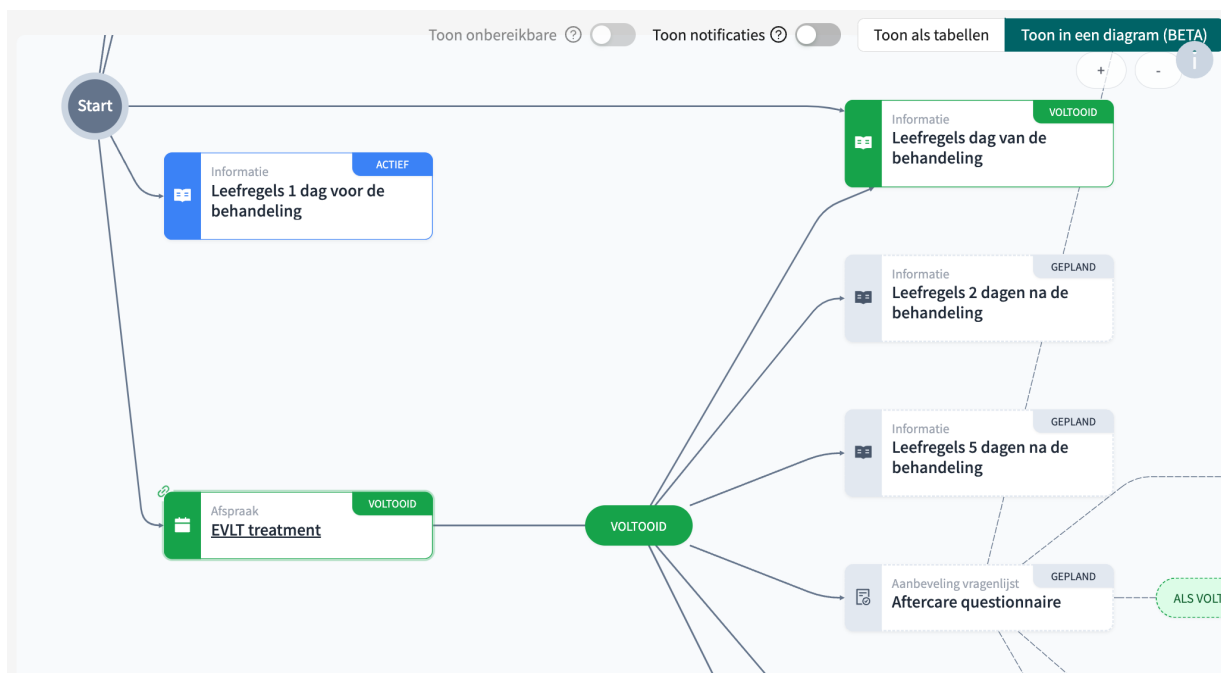

De patiëntmeldingen worden standaard verborgen en kunnen getoond worden door te klikken op **Toon notificaties**. Naarmate het pad vordert, kunnen sommige stappen "onbereikbaar" worden, bijv. als een herinnering alleen moet worden verzonden als een vragenlijst niet is ingevuld, wordt de herinnering een onbereikbare stap als de vragenlijst is ingevuld. De onbereikbare stappen zijn standaard verborgen in het diagram, maar kunnen getoond worden door te klikken op **Toon onbereikbare stappen**.

10. Informatie over een zorgpad weergeven

10.1. Vragenlijsten weergeven

Er zijn verschillende plaatsen waar je vragenlijststatussen en resultaten kunt bekijken, zie volgende paragrafen.

10.1.1. Status

Om de status van een vragenlijst te controleren, ga je naar **Patiëntenprofiel > Tickets > Vragenlijst tickets**. Hier kun je zien wanneer de vragenlijst is geactiveerd, wanneer deze verloopt, de status en indien voltooid de voltooiingsdatum (**Gebruikt op**). Je kunt vragenlijst tickets ook annuleren voordat ze zijn gebruikt of verlopen door op het prullenbak-/verwijdersymbool rechts in de rij te klikken.

Booking ticket		Vragenlijst ticket		Betaal tickets	
Reden voor de vragenlijst	Geldig vanaf	Geldig tot en met	Gebruikt	Status	Aangemaakt door
+ Agreement surgery/treatment	2024-04-15	2024-04-22	-	VERLOPEN	-
+ Questionnaire BRMO/MRSA	2024-04-15	2024-04-22	-	VERLOPEN	-

10.1.2. Antwoorden op de vragenlijst

Om de antwoorden van de patiënt op een specifieke vragenlijst te zien, ga je naar **Patiëntprofiel > Patiëntenactiviteit > Gesprekken** en kies je de vragenlijst waarvan je de antwoorden wilt zien.

Afspraken		Interviews		
Datum	Titel	Type	Status	Zorgpersoneel
3 sep 2024	Nazorg vragenlijst	Vragenlijst	Ingevuld	- Care unit
3 sep 2024	Toestemming operatie/behandeling	Vragenlijst	Ingevuld	- Care unit

Als je op een vragenlijst klikt, worden de details van de vragenlijst weergegeven:

[Patiëntgegevens](#) [Tickets](#) [Patiënt activiteit](#) [Zorgpaden](#)   [Nieuwe afspraak](#)

VRAGENLIJST, CARE UNIT
Nazorg vragenlijst
Begonnen op 03-09-2024 11:02
[Triage aanbeveling](#)

Allergieën

Diagnoses

Medicatie

Operatie

Originele tekst

Origineel antwoord

Nazorg vragenlijst

Nazorg vragenlijst

Op drie momenten na uw EVLT-behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Het is belangrijk deze vragenlijsten in te vullen, zodat wij uw herstel beter kunnen volgen. En u, wanneer nodig, hierin kunnen begeleiden.

[Ga verder](#)

De **Originele tekst** is de SmartText, dat wil zeggen de automatisch gegenereerde samenvatting van het antwoord van de patiënt. De **Originele antwoorden** zijn de exacte antwoorden van de patiënt op elke vraag in de vragenlijst.

Als de patiënt foto's heeft geüpload in de vragenlijst, worden deze weergegeven in de tab **Uploads**.

10.1.3. Grafieken

Om gezondheidsgegevens grafieken in te zien (verzameld via vragenlijsten), ga je naar **Patiëntenprofiel > Gezondheidsgegevens**.

MN

Milo

33 jaar, 1991

Patiëntgegevens

Tickets

Meetwaarden

Patiënt activiteit

Zorgpaden

Nieuwe afspraak

Gezondheidsgegevens

Ingeschreven voor 1 thuismonitorings programma

Inschrijven voor thuismonitoringsplan

Activiteiten toevoegen

Activiteiten beëindigen

Bloeddruk

Actief

Laatste: Afgelopen woensdag om 10:56

123/45 mm[Hg]

80 BPM

Actief

Laatste: Afgelopen woensdag om 10:56

10.2. Afspraken en boekingen gekoppeld aan een zorgpad

Om alle digitale en fysieke afspraken (boekingen) gekoppeld aan een zorgpad te zien, ga je naar **Patiëntprofiel > Patiëntactiviteit > Afspraken**. Hier zie je alle verlopen en geplande afspraken van de patiënt.

PS

Peter Surname

34 jaar, 199008NN-NNNN

Geslacht

Lengte

Gewicht

BMI

Patiëntgegevens

Tickets

Meetwaarden

Patiënt activiteit

Zorgpaden

Nieuwe afspraak

Afspraken

Taken

Overleggen

Interviews

Datum	Type	Titel	Status	Zorgpersoneel
16 dec 2024	Online afspraak	Acne	Beindigd	Name Surname Care unit
1 okt 2024	Online afspraak	Acne	Beindigd	Name Surname Care unit
2 jul 2024	Online afspraak	Allergie	Geannuleerd	Name Surname Care unit

Als je op een afspraak klikt in de **Afsprakenlijst** open je een gedetailleerde weergave van de afspraak.

FS

Firstname Surname

32 jaar, 19XXXXXX-XXXX

Geslacht

Man

Lengte

190 cm

Gewicht

85 kg

BMI

Huidige afspraak

Patiëntgegevens

Tickets

Patiënt activiteit

Zorgpaden

Nieuwe afspraak

01 oktober 2024

SMS verzonden 11:46

Je moet de patiënt ontvangen voordat je de chat kunt starten

Share pharmacy records

Share medical history

Deze afspraak is voor de rol: Arts

Niet gereed

VRAGENLIJST

ZINNEN

Typ je bericht hier...

Typ om te zoeken naar een zin

Verzenden

ONLINE AFSpraak (TOEKOMSTIG)

Acne

Geplande afspraak 04-10-2024 11:30

Niet medische informatie

Herkomst: Pathways Sandbox

Allergieën

Diagnoses

Medicatie

Operatie

Notities

Originele tekst

Origineel antwoord

Patiënt heeft geen vragen beantwoord die gekoppeld zijn aan deze afspraak

OPMERKING

Voor fysieke afspraken (d.w.z. afspraken die buiten de Clinic-applicatie plaatsvinden) kun je geen gedetailleerde weergave openen.

10.3. Boekingtickets gekoppeld aan een zorgpad

Om de status van een boekingsticket gekoppeld aan een zorgpad te bekijken, ga je naar **Patiëntenprofiel > Tickets > Boekingstickets**. Hier kun je zien wanneer de boeking is geactiveerd, wanneer deze verloopt, de status en indien voltooid de voltooiingsdatum (**Gebruikt op**). Je kunt boekingstickets ook annuleren voordat ze zijn gebruikt of verlopen door op het prullenbak-/verwijdersymbool rechts in de rij te klikken.

36

Tickets Formuliertickets

	Reden voor afspraak	Geldig vanaf	Geldig tot en met	Gebruikt	Status	Aangemaakt door	
+	Aknebesvär	2022-07-08	2022-07-26	2022-07-08	GEBRUIKT	Stefan	
+	Aknebesvär	2022-12-01	2022-12-07	-	VERSTREKEN	Sven	

10.4. Taken aangemaakt in een zorgpad

Taken zijn meldingen die worden verstuurd naar een zorgverlener. Deze logica is vooraf geconfigureerd. Er kan bijvoorbeeld een taak worden verstuurd als een patiënt een vragenlijst wel of niet heeft beantwoord, of als een patiënt zijn boekingsticket niet gebruikt.

Taken kunnen verschillende prioriteiten hebben, zodat zorgverleners weten welke taken ze als eerste moeten behandelen. Een voorbeeld zou een taak zijn die verstuurd wordt wanneer de patiënt een hoge pijnscore aangeeft in een vragenlijst. Een 6 op schaal van 1-10 zou een prio 2 taak kunnen zijn, terwijl een 8 een prio 1 taak verstuurd.

De taak kan verstuurd worden naar een rol of naar een specifieke zorgverlener.

10.4.1. Inkomende taken

Alle inkomende taken worden weergegeven in het tabblad **Inkomend** in het **Takenoverzicht**. De taken zijn gegroepeerd per patiënt en gesorteerd op prioriteit. De taken kunnen worden gefilterd op zorgenheid en zorgverlener, en op type taak. Gebruik de keuzelijsten om deze filters toe te passen. Het is hierin mogelijk om meerdere opties te selecteren.

Gebruik de schuifknop **Ook afgetekende weergeven** om ook de reeds afgetekende taken te tonen.

Taken

 Nieuwe taak aanmaken

Inkomend Aangemaakt door mij Afgetekend door mij Toegewezen aan mij

Van wie wil je de taken zien?

New triage UI ×

Filter op soort

Selecteer een of meer opties

Ook afgetekende weergeven ☒

Patiënt	Prioriteit Inhoud	Toegewezen personen	Rol	Aangemaakt
Loise 19 83	3 Miste activiteit (33)		Arts	7 jul 2023 - 8 aug 2023
My Child 20 18	3 Miste activiteit (32)	TN	Verpleegkundige	4 jul 2022 - 4 aug 2022

10.4.2. Taken door mij afgetekend

Het tabblad **Afgetekend door mij** in het Takenoverzicht toont alle taken die door de aangemelde zorgverlener zijn afgetekend.

Taken

 Nieuwe taak aanmaken

Inkomend	Aangemaakt door mij	Afgetekend door mij	Toegewezen aan mij
Patiënt	Prioriteit Inhoud	Aangemaakt	Afgetekend op
Jonattan 19 50	1 Afspraak geannuleerd (1)	23 mrt 2023	16 sep 2024
Peter 19 82	3 Afspraak opvolgen (1)	4 mrt 2024	4 mrt 2024

11. Termen en definities

B1-B2	B1-B2 in de zelfbeoordelingsschaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK), bijv. onafhankelijke gebruiker van de taal.
C1-C2	C1-C2 in de zelfbeoordelingsschaal van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (ERK), bijv. vaardige gebruiker van de taal.
Customer Success Manager (CSM)	Een CSM (Customer Success Manager) is de belangrijkste strategische adviseur van de klant. De CSM is ook de belangrijkste contactpersoon van de klant voor contractuele, commerciële vragen/problemen. De CSM is het eerste escalatiepunt voor onopgeloste vragen/verzoeken/problemen
supergebruiker	Een supergebruiker is een eindgebruiker met meer kennis over het platform (vaak per zorgeenheid). De supergebruiker fungeert als eerstelijns ondersteuning voor de eindgebruikers van het hulpmiddel en is degene die zich wendt tot Platform24 voor verdere ondersteuning, indien nodig.
unieke persoonlijke identificatie	Voor zorgverleners: kan bijvoorbeeld e-mail, HSA-ID zijn Voor patiënten: kan bijvoorbeeld e-mail, persoonlijk identificatienummer, verzekeringsnummer, BSN zijn

12. Handleidingversies

#	Datum	Beschrijving
1.0	22-03-2024	1e versie.
2.0	08-11-2024	De belangrijkste updates zijn: • Algemeen: afbeeldingen bijgewerkt met betere voorbeelden. • Hoofdstuk 1. <i>Over zorgpaden</i> bijgewerkt. • Hoofdstuk 3. <i>Symbolen</i> bijgewerkt om ook een definitie te bevatten van de voorzorgsmaatregelen in de Handleidingen. • In paragraaf 3.1. <i>Definitie van symbolen</i> is het vorige waarschuwingsymbool vervangen door een 'Let op'-symbool om de gebruikers erop te wijzen dat ze de gebruiksaanwijzing moeten raadplegen voor relevante waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. • Paragraaf 8.2. <i>Over uitgebreid met "Aantal fasen" en "Huidige fase"</i>. • Vorige paragraaf 8.5. <i>Een informatieartikel bewerken in de Beheerapplicatie</i> verwijderd en verwijzing toegevoegd naar de <i>Smart Care Plans Studio-handleiding</i> in hoofdstuk 12. <i>Referenties</i>. • Paragraaf 9.1. <i>Vragenlijsten weergeven</i> verduidelijkt.
3.0	27-03-2025	• Algemeen: Zorgpaden hernoemd naar Smart Care Plans. In de titel van de handleiding en in de inleiding wordt Smart Care Plans - Episodisch gebruikt om te verduidelijken dat deze handleiding episodische zorgstromen beschrijft. • Er is een hoofdstuk Inleiding toegevoegd met een nieuwe paragraaf: 1.2. <i>Hardware- en softwarespecificaties</i>. • Inleiding hoofdstuk bijgewerkt met hoe een zorgpad kan worden geactiveerd. • De regelgeving is bijgewerkt op de voorpagina en op pagina 2. • Adres van de fabrikant bijgewerkt op pagina 2 en in de sectie 2.1. <i>Fabrikant</i>. • Hoofdstuk Contactgegevens bijgewerkt met een nieuwe paragraaf 2.3.1. • Nieuwe symbolen beschreven in hoofdstuk 3. • Nieuw hoofdstuk: 4. Smart Care Plans - Beoogd gebruik.
4.0	09-05-2025	Paragraaf 1.1. <i>Over Smart Care Plans - Episodisch</i> bijgewerkt.

13. Referenties

Categorie	Beschrijving
Clinic-handleiding	Raadpleeg de <i>Clinic-handleiding</i> voor een beschrijving van de algemene workflows en functionaliteit in Clinic die niet specifiek is voor Smart Care Plans. Voorbeeld van workflows en functionaliteit beschreven in de <i>Clinic-handleiding</i>: • Patiënten zoeken • Meldingen • Gebruikers • Type diensten • Digitale afspraken: • Synchroniseren • Asynchroon • Patiëntprofiel
Smart Care Plans Studio-handleiding	Raadpleeg de <i>Smart Care Plans Studio-handleiding</i> voor een beschrijving van het bewerken van een informatieartikel in de applicatie Manage.